

высотой 100 мм (таб.1 графы G, H), с чехлом из кожзаменителя ПВХ (таб.1 графы I, J) .

8. Свидетельство о приёмке

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией (ТУ 9396-001-09922741-2014, сертификат соответствия № РОСС RU.МН33.Н00004) и признан годным к эксплуатации.

9. Свидетельство об упаковке

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом упакован на предприятии Изготовителя согласно требованиям ТУ 9396-001-09922741-2014.

10. Гарантийные обязательства

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех технических характеристик изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.

10.2 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в результате неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

10.3 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Помощник руководителя



Мочегова Е.А.

Штамп ОТК

Дата выпуска: 2022 г.



Гарантийный талон

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом

_____ (год, месяц выпуска)

Гарантируется исправность изделия в течение 12 месяцев с момента продажи (при условии соблюдения правил эксплуатации)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭсДжиМедикал»

код ОКПД-2

31.03.12.120

Код ТН ВЭД

94042910

МАТРАЦ МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРУЖИННЫЙ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ ЧЕХЛОМ

ТУ 9396-001-09922741-2014

ПАСПОРТ

2022 г.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

1. Основные сведения об изделии

1.1 Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом изготавливается в соответствии с ТУ 9396-001-09922741-2014.

1.2 Изделие имеет РУ № РЗН 2016/5212 от 09.08.2018 г и Сертификат соответствия № РОСС RU.МН33. Н00004 с 04.08.2021 г.

1.3 В целях повышения надежности и долговечности изделия, прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

2. Сведения об изготовителе

Изготовитель - ООО «ЭсДжиМедикал». Адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70, эт. 5, пом. I, ком. 27, тел. 8 (495) 120-10-67.

E-mail: www.sgmedical.ru

3. Назначение изделия

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом (далее Изделие), предназначен для настила на медицинские кровати поверх сетки, а также для функциональных кроватей, предназначенных для ухода за больными, для реабилитации, восстановления организма, для создания удобной поверхности, на которой можно длительное время отдыхать, лежать, спать.

Матрацы используются в лечебных, реабилитационных, профилактических медицинских учреждениях, а также в домашних условиях.

4. Технические характеристики

1. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом состоит из:
- внутреннего мягкого объемного элемента:

- а) пенополиуретан эластичный (НПВ);
 - б) пенополиуретан вторичного вспенивания (НПВВ);
- с одной или двух сторон которого могут быть нанесены поперечные и продольные насечки (штрибированный).
- водонепроницаемого чехла.

5. Комплектность

- 5.1 Матрац – 1 шт.;
- 5.2 Паспорт – 1 шт.;
- 5.3 Упаковка – 1 шт.;

6. Хранение, транспортировка, эксплуатация и утилизация

6.1 Транспортировка изделия осуществляется в упаковке в закрытом транспорте (автомобильном, железнодорожном, воздушном или водном) в порядке, установленном по условиям 2 ГОСТ15150-69, с учётом следующих требований: температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50° до +50°С.

6.2 Изделие должно храниться только в упаковке, в помещениях по условиям 2 ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды в диапазоне от -50° до +50°С).

6.3 Изделие, согласно ГОСТ 50444-92, пригодно к эксплуатации при температуре

окружающей среды от +40° до - 25° С и номинальной относительной влажности воздуха от 70% (при +15°С) до 100% (при +25° С).

6.3 Утилизацию изделия проводить как отходы класса А по СанПин 2.1.7.2790.

6.4 Изделие упаковано в индивидуальную полиэтиленовую плёнку (пакет).

6.5. Допускается влажная чистка мягкой салфеткой или щёткой, смоченной в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных и хлорсодержащих материалов. Чехол матраца допускает стирку с применением бытовых моющих средств.

6.6. Чехол матраца обладает устойчивостью к воздействию агрессивной биологической жидкости (пота, мочи) в соответствии с МУ 25.1-001.

6.7 Химическая чистка и стирка чехлов по ГОСТ 25652-83.

6.8. Дезинфекция матраца производится по МУ-287-113 любыми дезинфицирующими ми и моющими средствами методом орошения или протирания, а также обработкой в дез. камере при температуре не более 90 град.С.

7. Маркировка и размеры изделия

Таблица 1

Количество секций		Длина мм		Ширина мм		Высота мм		Материал чехла	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	односекционный	1	1900	1	600	1	80	1	Кожзаменитель ПВХ
2	двухсекционный	2	2000	2	700	2	100	2	Синтетическая ткань с полиуретановой мембраной
3	трёхсекционный	3	1600	3	800	3	60	3	Синтетический трикотаж с полиуретановой мембраной
4	четырёхсекционный	4	1700	4	900	4	120		
5	двухсекционный штрибированный	5	1800	5	850	5	140		
6	трёхсекционный штрибированный	6	1850	6	950	6	150		
7	четырёхсекционный штрибированный	7	1950	7	1000	7	200		
8	универсальный штрибированный	8	1200	8	1200				

Пример условного обозначения матраца: Матрац беспружинный с водонепроницаемым чехлом.

- с наполнителем из пенополиуретана эластичного (п. 4.1а), односекционный (табл. 1 графы А, В), длиной 2000 мм (таб.1 графы С, D), шириной 800 мм (таб.1графы Е, F),